



## ENKEL INSTRUMENT FORBEHANDLING

### Aniosyme Foam

#### KLAR-TIL-BRUG FORBEHANDLINGS SKUM TIL MEDICINSK UDSTYR OG KIRURGISKE INSTRUMENTER

Skumspray til behandling af medicinsk udstyr og kirurgiske instrumenter. Sikrer optimal opløsning af urenheder på instrumenter med længere tids henstand (op til 72 timer) eller før maskinel behandling.

Aniosyme Foam er:

- **ENKEL** - Let at anvende
- **HURTIG** - Forhindrer indtørring af urenheder
- **EFFEKTIVT** - Stabil skum med god fugtafgivning



# Aniosyme Foam

Klar-til-brug forbehandlings skum til medicinsk udstyr og kirurgiske instrumenter



Aniosyme Foam  
Spray

## ENKEL

Let at anvende.

## HURTIG

Forhindrer indtørring af urenheder.

## EFFEKTIVT

Stabil skum med god fugtafgivning.


| VI TILBYDER                                   | FORDELE                                     | ANIOSYME FOAM |
|---|---|---------------|
| ENKEL - Let at anvende                        | Klar-til-brug opløsning i en handy beholder | Ja            |
| HURTIG - Forhindrer indtørring af urenheder   | Gør efterbehandling lettere                 | Ja            |
| EFFEKTIVT - Stabil skum med god fugtafgivning | Forberedelse kan ske under operationen      | Ja            |

## ANVENDELSESOMRÅDE

Klar til brug forbehandlingsskum til optimal opløsning af forurening på instrumenter med længere tids henstand (op til 72 timer) eller før maskinel behandling. Forhindrer indtørring af urenheder og gør forrensning lettere med en god rengøringseffekt.

Det tykke skum garanterer jævn dækning af instrumentets overflade. Aniosyme Foam er kompatibel med en bred vifte af materialer. Ikke egnet til instrumenter lavet af zink eller jern.

## BRUGSANVISNING FOR ANIOSYME FOAM

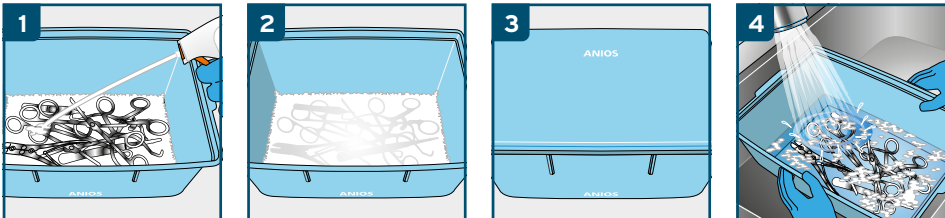

- På forhånd sprøjtes bunden af instrumentbakken med Aniosyme-skum, og instrumenter opsamles og placeres.
- Dæk alle instrumenterne igen med skum.
- Dæk bakken med låget.
- Skyl behandlet medicinsk udstyr grundigt med rent vand for at fjerne alle spor af produkt og organisk materiale.

## ORDRE INFORMATION

| PRODUKT       | FORPAKNING          | VARENUMMER |
|---------------|---------------------|------------|
| Aniosyme Foam | 12 X 750 ml flasker | 3105360    |



**CE** LABORATOIRES ANIOS  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Forhandles af:  
**ECOLAB APS.**  
Høfdingsvej 36.  
DK 2500. Valby  
Danmark

## ANVENDELSESOMRÅDE

Rengøring af medicinsk-kirurgisk udstyr: til tør transport eller før maskinrensning. Opretholder et tilstrækkeligt fugtighedsniveau for at undgå indtørring af blod og andre organiske materialer.

## BRUGSANVISNING

### Klar til brug løsning.

- På forhånd sprøjtes bunden af instrumentbakken med Aniosyme-skum, og anbring de indsamlede instrumenter.
- Dæk alle instrumenterne igen med skum.
- Dæk bakken med låget.
- Skyl behandlet medicinsk udstyr grundigt med ledningsvand for at fjerne alle spor af produkt og organisk materiale. Ikke egnet til instrumenter lavet af zink eller jern.

## INGREDIENSER

Non-ioniske tensider, enzymer (proteaser, lipaser og amylaser), kompleksdannende stoffer, hjælpestoffer.

## OPBEVARING


Farligt - respekter forholdsreglerne ved brug i henhold til de gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: mellem +5°C og +25°C.

## CERTIFIKATER

Kan rekvireres.

## MEDICINSK UDSTYR ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs label og produktinformation.

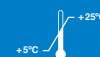

UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL  
ANVENDELSE

**ECOLAB**<sup>®</sup>

www.ecolab.dk