



NEUTRALISERENDE AFSPÆNDINGSMIDDEL TIL INSTRUMENT GENBEHANDLING

Anios RDA

NEUTRALISERENDE AFSPÆNDINGSMIDDEL, TØRRE AKTIVATOR

- Giver et skinnende pletfri resultat
- Kan anvendes ved enhver vandkvalitet
- Særdeles kompatibelt med polysulfones og POM



Anios RDA

Neutraliserende afspændingsmiddel, tørre aktivator



Anios RDA
5 L dunk

PRODUKTEGENSKABER

- Svag gul, transparent væske
- pH koncentreret produkt ved 20°C: min 2,1 - max. 4
- pH opløsning ved 0,03%*: ca.4
- pH opløsning ved 0,1%*: ca.3,6
- Densitet ved 20°C: 1,035
- Konduktivitet ved 0,03% - 0,1%: 67 - 139 µS/cm

*pH-værdimålinger under driftsbetingelser, altid ved hjælp af et pH-meter med temperaturkompensation.

FORPAKNING OG ORDRE INFORMATION

PRODUKT	PAKKESTØRRELSE	VARENUMMER
Anios RDA	2 x 5 L dunk	3112440

ANVENDELSESOMRÅDE

Produkt til skylning af medicinsk-kirurgiske instrumenter og medicinsk udstyr i vaskedekontaminator forsynet med RO vand eller almindeligt vand. Neutraliserende virkning på alkaliske rester fra detergenter, fjernelse af mineralrester fra vand under vaskecyklussen. Tørringsaktivator.

BRUGSANVISNING

Koncentreret , til professionel brug. Anvendes ved en opløsning på 0,03 til 0,1% (dvs. 0,3 til 1 ml pr. Liter vand) under skylleprocessen. Kompatibel med termisk desinfektion.

INDEHOLDER

Non-ioniske og anioniske overfladeaktive stoffer, mælkesyre, ethanol og hjælpestof.

OPBEVARING

Farligt - respekter forholdsreglerne ved brug (udarbejdet i henhold til gældende europæiske regler for klassificering og mærkning af kemiske produkter). Opbevaring: + 5°C til + 25°C.

CERTIFIKATER

Kan rekvireres

MEDICINSK UDSTYR, ANVEND MED FORSIGTIGHED

Læs venligst label og produkt information



UDELUKKENDE TIL PROFESSIONEL
ANVENDELSE



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Forhandles af:
ECOLAB APS.
Høffdingsvej 36.
DK 2500. Valby
Danmark



www.ecolab.dk