



RENGØRINGS- OG DESINFEKTIONSOPLØSNING TIL MEDICINSK UDSTYR OG GENERELLE OVERFLADER

WIP'ANIOS EXCEL

KLAR-TIL-BRUG-SERVIETTER TIL RENGØRING OG DESINFEKTION

Brugsklar serviet til rengøring og desinfektion af overflader til ikke-invasivt og medicinsk udstyr, der ikke kan nedsænkes, til aftørring af endoskopihylstre under forbehandling før nedsækning til rengøring og desinfektion; og til almindelige overflader (biocidpåføring).

Kombinerer bredspektret effektivitet med fremragende materialekompatibilitet (herunder alkoholfølsomme overflader) og er et skånsomt rengøringsmiddel.

Egenskaberne gør WIP'ANIOS EXCEL velegnet til brug på en lang række overflader i sundhedssektoren og et ideelt produkt til intensivafdelinger og andre andre højrisikoområder. Dette gør det muligt at bruge produkterne i praksis som det er tiltænkt i dine protokoller, og leverer de desinfektionsresultater og den compliance der kræves for effektiv desinfektion for at begrænse spredningen af patogener.

- Formel uden parfume og farvestoffer
- Rengøring og desinfektion i ét trin, så overfladen efterlades synligt ren
- 100 % biologisk nedbrydelige viskoseklude og formel



WIP'ANIOS EXCEL

Brugsklar serviet til rengøring og desinfektion af overflader til ikke-invasivt og ikke-nedsænkligt medicinsk udstyr og aftørring af endoskopiske hylstre under indledende behandling før nedsækning til rengøring og desinfektion; og til almindelige overflader (påføring af biocid).

PRODUKTEGENSKABER

- Renser og desinficerer på en gang
- Alkoholfri, parfumefri og fri for farvestoffer
- Bredspektret antimikrobiel effekt
- Formlen sikrer kompatibilitet med en bred vifte af materialer, herunder polymerer (f.eks. polycarbonat, plexiglas)
- pH værdi : 6
- WIP'ANIOS EXCEL-servietten er 100% viskose

MIKROBIOLOGISKE EGENSKABER

EFFEKTIVITET	KONTAKTTID
Bakteriedræbende - I henhold til: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Gærdræbende - I henhold til: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberculolin dræbende I henhold til EN 14348*	60 min
Effektiv mod omsluttede vira i henhold til EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sek
Virucid med begrænset spektrum i henhold til EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* snavsede forhold

BESTILLINGSOPLYSNINGER

PRODUKT	EMBALLAGE ENHED	BESTILLINGSKODE
WIP'ANIOS EXCEL	6 x 100 wipes	3138262
Vægmonteret holder til flowpacks (holdbar polypropylen)	12 x 1	10057686

ANVENDELSESOMRÅDE

Hurtigtvirkende, klar-til-brug overflade rengøring og desinfektion af overflader ikke-invasivt og ikke-nedsænkligt medicinsk udstyr og aftørring af endoskopiske hylstre under indledende behandling før nedsækning til rengøring og desinfektion; og til almindelige overflader (påføring af biocid).

BRUGSANVISNING

Klar-til-brug-servietter.

Påfør på hele det område, der skal behandles, brug så mange servietter som nødvendigt. Luk emballagen ordentligt efter hver gang den er blevet åbnet. Genbrug ikke servietterne : desinficering kan ikke længere garanteres. Overhold den anbefalede kontakt tid for at opnå den nødvendige antimikrobielle aktivitet. Skyl grundigt de behandlede områder, der er beregnet til at komme i kontakt med huden eller slimhinderne med vand. Gentag påføringen så ofte efter behov.

Der henvises til producentens brugsanvisning til rengøring og desinficering af medicinsk udstyr. Videnskabeligt mappe (effektivitet, kompatibilitet osv.) kan fås på anmodning. Åben holdbarhed baseret på EN 16615: 3 måneder.

INGREDIENSER

Opløsning til imprægnering indeholder: Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS-nr. 7173-51-5) 3 mg/g, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, chelat, hjælpestoffer.

CERTIFIKATER

Medicinsk udstyr og biocid. Fuld antimikrobiel aktivitet for WIP'ANIOS EXCEL er inkluderet i det videnskabelige mappe, som kan fås på anmodning.

OPBEVARING

Opbevaring: mellem +5°C og +25°C.

MEDICINSK UDSTYR OG BIOCIDER ANVENDES SIKKERT

Læs venligst etiketten og produktoplysningerne.



KUN TIL PROFESSIONEL BRUG.